


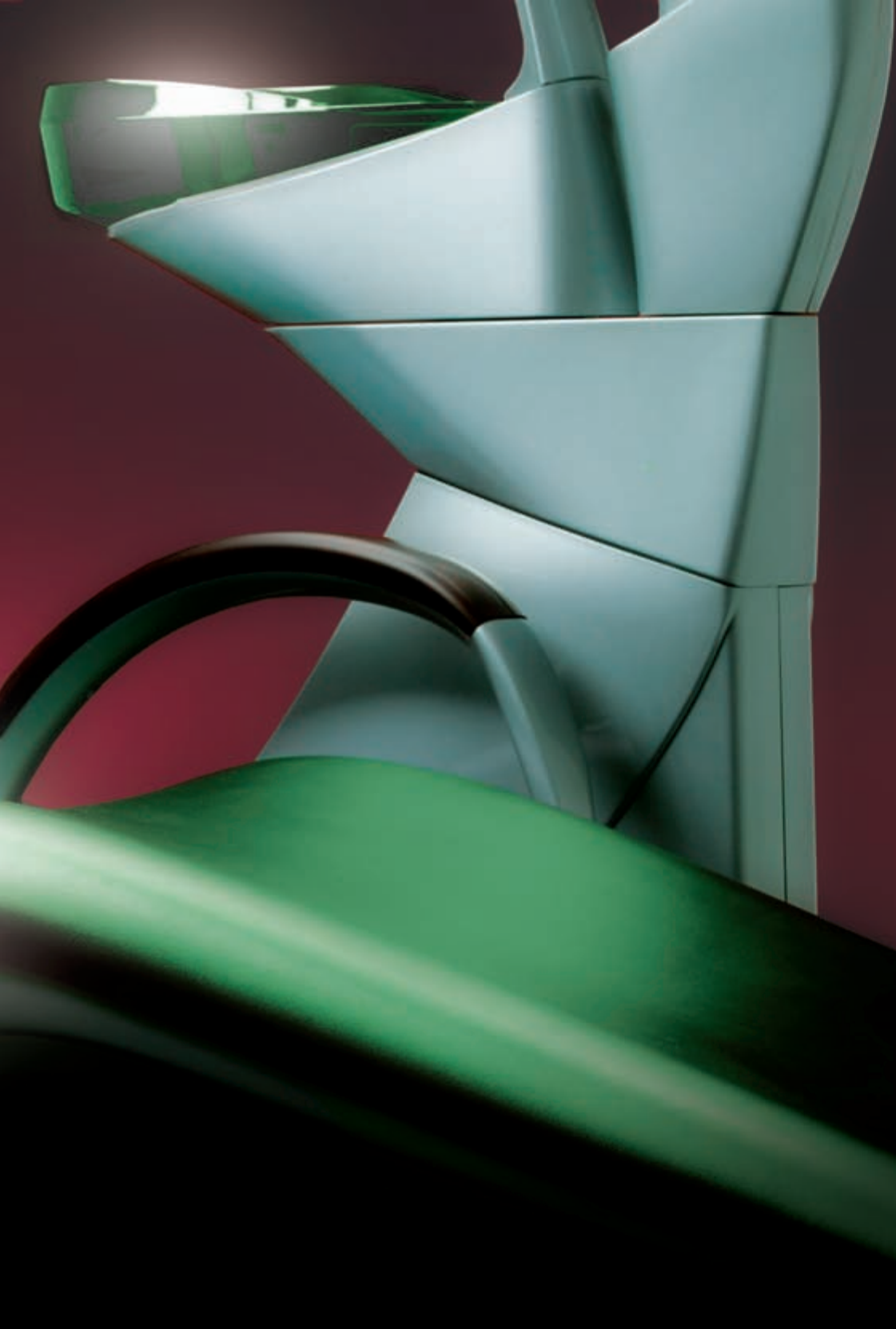

Septus
PdW








Эргономика и лаконичность форм Septus созданы для комфорта

- Мягкое сверхамортизированное кресло для максимального удобства пациента
- Инновационный сенсорный экран для настройки инструментов и кресла
- Блок врача PdW для оптимально удобного управления и простоты использования
- Подголовник с автоматическим управлением и электромеханическим приводом, повторяющий естественные положения головы
- Автоматически поворачивающаяся при активации функции полоскания стеклянная чаша плевательницы
- Операционный бестеневой равномерно распределяющий яркость светильник Luna Vue SP с откидным зеркалом для пациента
- Ножная педаль с широким диапазоном автоматических действий



Мягкое сверхамортизированное кресло для максимального удобства пациента

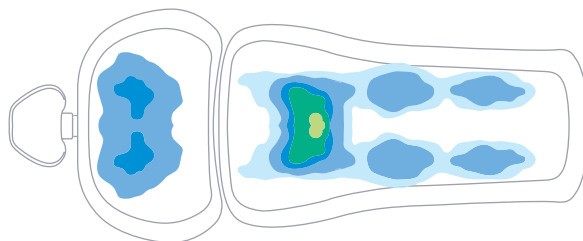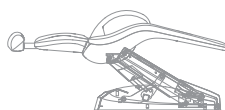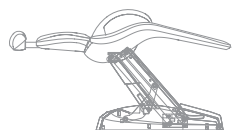

Мягкое и безопасное кресло

Сверхамортизация кресла позволяет пациенту не ощущать дискомфорта при изменении положения.

Механизм Z-Link

Новый скользящий механизм позволяет изменять высоту кресла от 400 до 750 мм без изменения расстояния между врачом и пациентом.

Комфорт

Спинка кресла перемещается таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство пациента при изменении положения кресла. Многослойные подушки и анатомическая форма кресла уменьшают напряжение и усталость в процессе длительного сеанса лечения.

2005.11.16 15:57

HS2



HS1



LS1



SC



DP-ZX



CAMERA



RCM



WS



Timer

Maintenance

Headrest




Home

Инновационный сенсорный экран для настройки инструментов и кресла

Главное меню




Самодиагностика

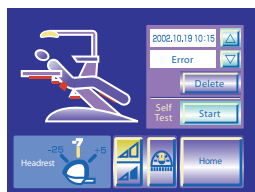


Удобный сенсорный экран для выбора установочных параметров настройки инструментов и кресла с активацией одним касанием.

Система управления Septus распознает все инструменты автоматически. Диалоговое окно показывает текущие настройки управления креслом и инструментами.


Турбинный наконечник
4H PAR -4HX-O
(с фиброоптикой)

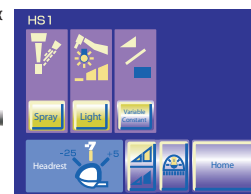


Микромотор
бесщеточный TR-91-O
(с фиброоптикой)

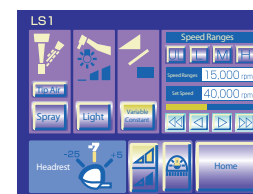


Полимеризационная
диодная лампа
VL-61-CU

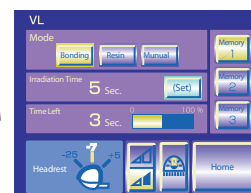

Ультразвуковой
скейлер Solfly

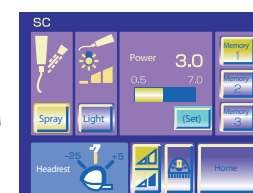

Dentaport ZX
(измерение длины
корневого канала зуба)

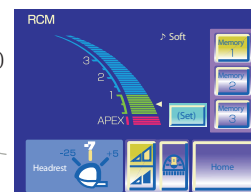


Dentaport ZX
(эндодонтический
наконечник с функцией
апекслокатора)







Блок врача PdW для оптимально удобного управления и простоты использования

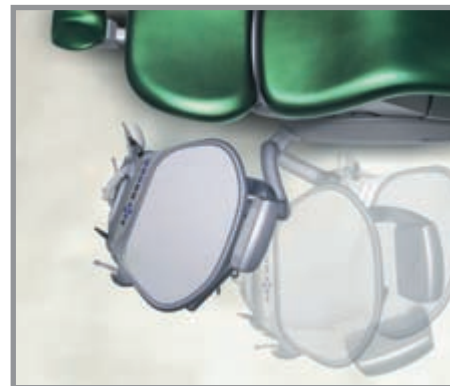

Расположение инструментов

Блок врача легко удобно расположить при любом положении врача — от «9 часов» до «12 часов». Порядок расположения инструментов выбирает врач, а система автоматически распознает их и выводит на дисплей.

Технологичность


Блок врача может быть оснащен 6 инструментами, включая внутриротовую камеру Penviewer и полимеризационную диодную лампу VL-61-CU.

Мобильность


Диапазон регулировки высоты блока врача — 200мм идеален для любой процедуры — от посадки пациента и обсуждения лечения до медицинских манипуляций.

Инфекционный контроль

Держатели инструментов легко отсоединяются для автоклавирования, а шланги — для дезинфекции.

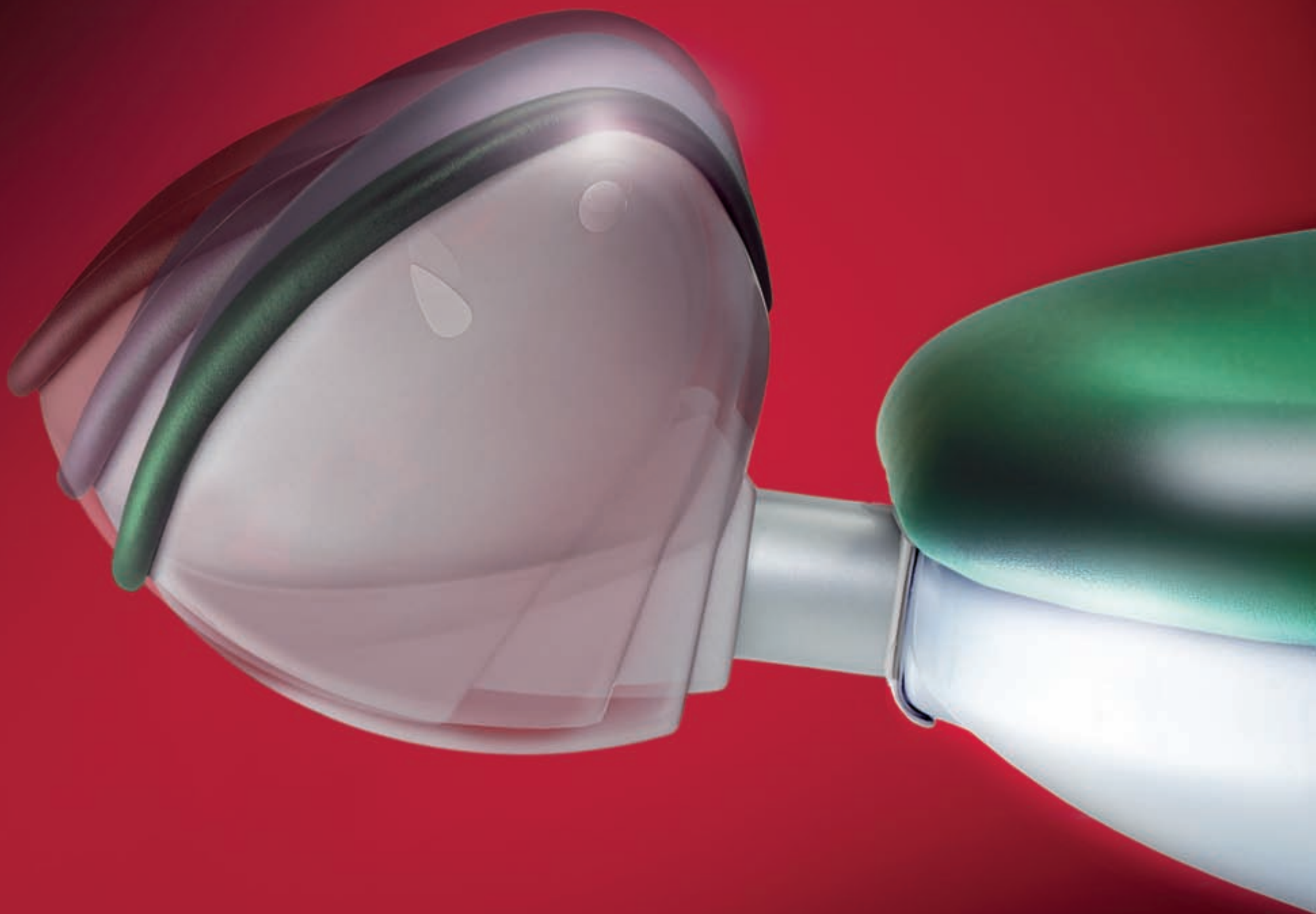

Подголовник с автоматическим управлением и электромеханическим приводом, повторяющий естественные положения головы

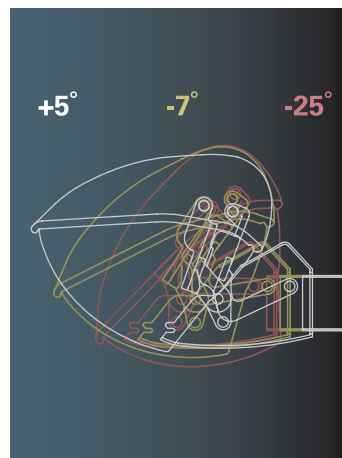

Удерживает голову пациента без напряжения шейных мышц. Изменение положения головы основано на анатомических особенностях шейных позвонков и не доставляет дискомфорта.



Ножное управление подголовником освобождает руки. Вы можете зафиксировать подголовник в одной из трех предустановленных позиций: +5°, -7°, -25°. Положение отражается на дисплее.



Автоматически поворачивающаяся при активации функции полоскания стеклянная чаша плевательницы



Поворот плевательницы одновременно с движением кресла

Плевательница автоматически поворачивается на 60 градусов к пациенту, когда кресло установлено в положение для полоскания полости рта.


Очистка автовакуумной системы

Специальный водосброс позволяет производить автоматическую очистку аспирационного шланга, наконечников и вакуумной камеры. Прибор для промывания полной системы водоснабжения чрезвычайно удобен и легок в использовании.



Операционный бестеневой равномерно распределяющий яркость светильник Luna Vue SP с откидным зеркалом для пациента

Конструкция отражателя из множества маленьких граней для равномерного распределения яркости.

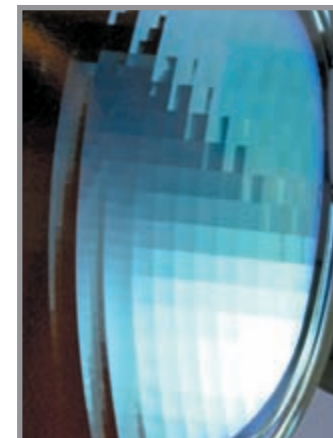


Многогранный рефлектор

Лампа Luna Vue SP равномерно распределяет 25 000 люкс света. Конструкция из граней устраняет различия в яркости между центральной частью и периферией. При цветовой температуре 4000 К и индексе цветопередачи (CRI) Ra90, освещение максимально приближено к естественному. Уровень яркости в 10 000 Люкс оптимален для диагностики. Ножное управление позволяет легко установить нужный режим.



Ножная педаль с широким диапазоном автоматических действий

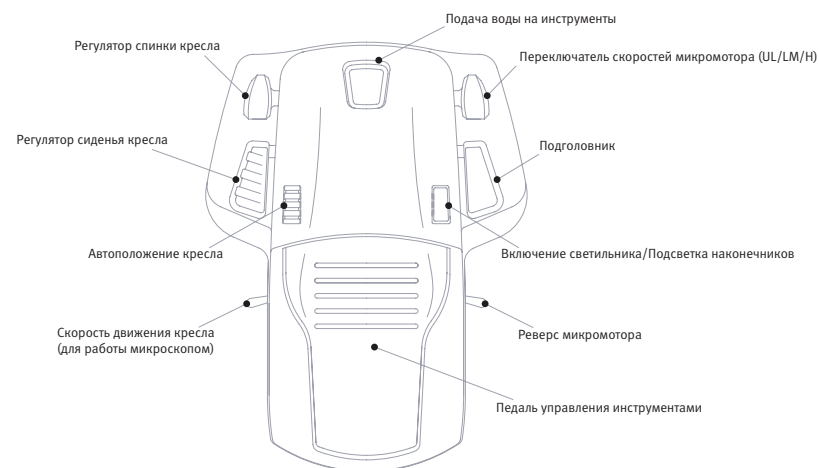

Автоматическое ножное управление

С помощью многофункциональной педали Вы можете управлять инструментами, креслом, подголовником и светом. Звуковой сигнал сопровождает каждое действие, и результат отображается на экране. Вам не приходится прикасаться к чему-либо, кроме как к инструментам, которые Вы используете для лечения.



VL-61-CU


Полимеризационная лампа высокой мощности. Равномерное распределение мощности во всей области полимеризации




Легкое достижение периферической стороны 7 моляра.

Мощный свет — с интенсивностью $1\,000\text{ мВт/см}^2$ работает даже на дистанции в 10 мм. Лампа вырабатывает равномерную мощность в центре и по краям области полимеризации.

Время отверждения композита: 20, 10 секунд
Время отверждения бондинга: 10 секунд

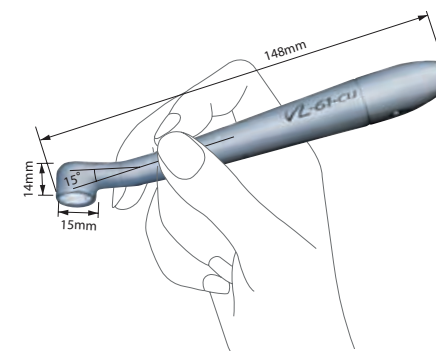

Легкая и компактная головка наконечника
Эргономична для оптимального управления
Диаметр головки наконечника: 15 мм
Высота наконечника: 14 мм
Вес: около 60 грамм

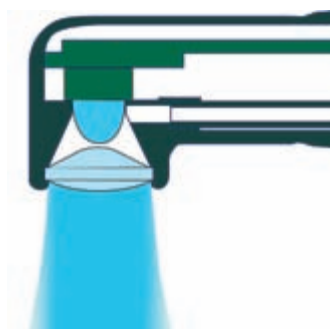

Высокоскоростной турбинный наконечник TwinPower Turbine 4H Series



Постоянный крутящий момент. Удивительно плавная работа. Прекрасный дизайн. Технология двойного использования рабочего воздуха.

Технология двойного использования рабочего воздуха

Инновационная технология, позволяющая вырабатывать постоянный вращающий момент мощностью до 25 ватт.

Быстрая тормозная система

Быстрая система остановки бора для оптимальной безопасности врача и пациента.

Уникальная технология нулевого обратного всасывания

Предотвращает всасывание спрея и загрязненных материалов в наконечник, шланги и блок врача.

Керамические шарикоподшипники

На 40% легче и в три раза прочнее, чем традиционные шарикоподшипники из нержавеющей стали.

Бесшумная работа

Усовершенствованная гидродинамика позволяет делать скоростное применение инструментов бесшумным.

Компактная головка наконечника

Улучшенную маневренность и превосходный доступ к области препарирования.

Фиброоптика

Высоко сфокусированное и неизменное освещение (25 000 Люкс).


Опции

Прямое подключение к наиболее распространенным типам разъема на шланге.

Легкая замена картриджа

Картридж капсульного типа при необходимости легко быстро заменить.

Воздух из шланга инструмента **1** приводит в действие основную крыльчатку **2**. Отработанный воздух направляется через фиксированные стабилизаторы **3** для приведения в действие второй крыльчатки **4**. Результатом является более мощный, постоянно заданный максимальный крутящий момент и постоянная скорость, даже под нагрузкой.

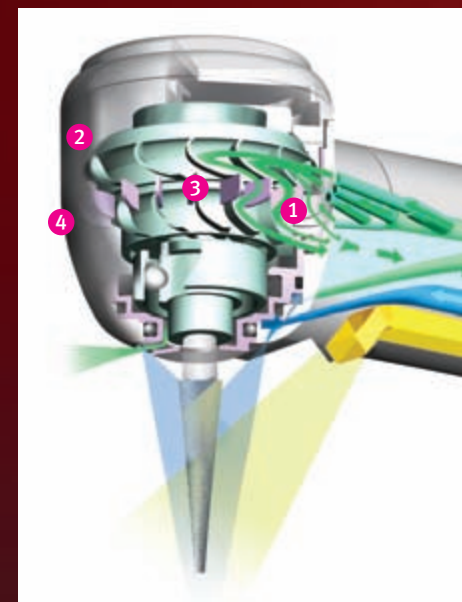

Бесщёточный микродвигатель Torx TR-91-O/TR-91 от 100 оборотов до 40 000 оборотов в минуту

Бесщёточный двигатель обеспечивает серии TR-91 более продолжительный период эксплуатации и стабильную скорость вращения.


Широкий диапазон скоростей для эффективного лечения

Работа при неизменной скорости и последовательно высоком вращающем моменте от самого медленного до самого высокого диапазона скоростей. Встроенный датчик вращения обеспечивает постоянную, почти неизменную скорость вращения в медленном диапазоне, предоставляя врачу точное управление и возможность работы при лечении корневого канала.

Полностью сбалансированный для легкого управления

Легкая и сбалансированная рукоятка уменьшает напряжение запястья.

Бесщёточный двигатель имеет более продолжительный срок службы и более постоянный скоростной режим вращения. Отсутствие угольных щеток и коллекторов, создающих трение, позволяет продлить срок работы двигателя и сделать скорость вращения стабильной.

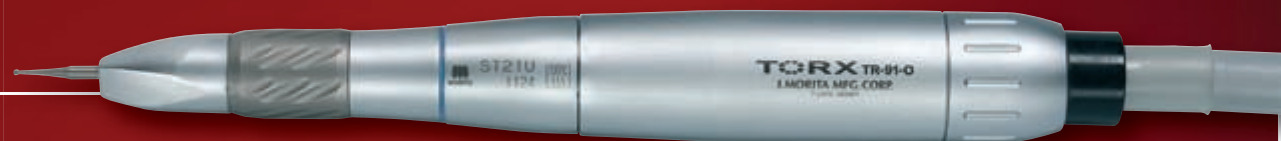

Спецификация

Spaceline Septus

Модель: CU-780

Электрическое напряжение сети:

220/230/240 вольт, переменный ток,
однофазное

Потребляемая мощность: 15 кВт*А

Высота подъема сиденья: от 400 мм до
750 мм

Угол наклона спинки сиденья: от 0 до 75°

Вес: примерно 230 кг

Цвета обивки:

Maziora Andromeda (780MA)

Maziora Seyfert (780MS)

Maziora Ruby (780MR)

Цвета корпуса:

Septus White (780W) — белый

Metallic Silver (780S) — серебристый
металлик

Metallic Green (780G) — зеленый металлик



Стул врача Septus



Безупречная комбинация функции и формы

Рабочий стул врача Septus уютно поддерживает Вашу естественную позу, и его оптимизированное распределение давления обеспечивает неподвижность, необходимую Вам при выполнении искусной и точной работы. Сиденье легко поднимается и опускается. Для этого необходимо ногой нажать на кольцо в нижней части стула и установить необходимую высоту стула.

Спецификация

Модель: OS-780


Механизм для поднятия высоты сиденья: баллон для сжатого газа

Высота сиденья: от 460 мм до 650 мм

Оснащено механизмом наклона

Вес: примерно 14 кг

Цвета обивки

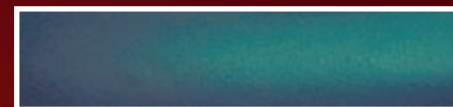

Maziara Andromeda (780MA)



Maziara Seyfert (780MS)



Maziara Ruby (780MR)

Цвета Maziara меняют свой цвет в зависимости от освещения



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

ЮНИДЕНТ | +7 (495) 434-4601 | fax +7 (495) 434-1020 | ЮНИДЕНТ-Поволжье | +7 (846) 979-8600 | fax +7 (846) 979-8601 | www.unident.net | unident@unident.net