



UNIDENT
SWISS

Салфетки UNISEPTA® Plus

Готовые к использованию одноразовые салфетки для быстрой дезинфекции поверхностей и медицинских приборов. Салфетки пропитаны раствором UNISEPTA® Plus и поставляются в двух форматах: салфетки стандартного размера и салфетки Jumbo. Удобные, экономичные, эти салфетки обладают широким спектром активности и идеально подходят для использования в промежутке между приёмом пациентов.

Основные характеристики продукта:

- на базе этанола
- свежий цитрусовый аромат
- не оставляют пятен и разводов
- соответствует требованиям международной директивы CE и может использоваться с медицинскими приборами (директива 93/42/ЕЕС – класс IIa)
- одобрен немецким обществом гигиены и микробиологии (раствор UNISEPTA® Plus)
- раствор, которым пропитаны салфетки (UNISEPTA® Plus) протестирован и отвечает требованиям Европейских стандартов
- салфетки стандартного размера (130 x 200 мм) поставляются в банках и запасных блоках ёмкостью 100 и 250 салфеток
- салфетки Jumbo (163,5 x 250 мм) поставляются в банках и запасных блоках ёмкостью 200 салфеток

Состав продукта:

В 100 г раствора UNISEPTA® Plus, которым пропитаны салфетки, содержится 55 г этанола, 0,11 г дидецилметил оксиэтиламмония пропианата, отдушки.

Эффективны против:

- бактерий
- микобактерий
- резистентного золотистого стафилококка
- кандид
- ВИЧ
- вируса гепатита В
- вируса гепатита С
- вируса герпеса
- ротавируса
- аденовируса
- коронавируса



Варианты поставки:

- Банка 100 салфеток стандартного размера
- Банка 200 салфеток Jumbo
- Банка 250 салфеток стандартного размера
- Запасной блок 100 салфеток стандартного размера
- Запасной блок 200 салфеток Jumbo
- Запасной блок 250 салфеток стандартного размера



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

ЮНИДЕНТ: +7 (495) 434-4601, fax +7 (495) 434-1020
ЮНИДЕНТ-Поволжье: +7 (846) 979-8600, fax +7 (846) 979-8601
www.unident.net e-mail: unident@unident.net



UNIDENT

Салфетки UNISEPTA® Plus

ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием:
Наденьте защитные перчатки

Показания к применению:

Салфетки UNISEPTA® Plus используются для дезинфекции предварительно очищенных медицинских приборов. Готовый к использованию одноразовый продукт. Перед использованием убедитесь в том, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию спирта. Выключите электрические приборы из розетки.

Меры предосторожности:

Меры предосторожности указаны в паспорте безопасности и на этикетке продукта. Препарат классифицирован как опасный, в соответствии с требованиями Европейской Директивы 99/45/ЕЕС.

Соответствует европейским стандартам:

Бактерицидные свойства: EN1040, EN1276, EN13727, EN14561
Фунгицидные свойства: EN1275, EN13624
Противотуберкулезные свойства: EN14348

Физические свойства:

Цвет	Салфетки белого цвета
Запах	Свежий цитрусовый аромат
Хранение	При температуре от +5°C до +25°C
Срок годности	3 года (закрытая банка)
Контейнер	Изготовлен из пластика, пригодного для переработки



Достаньте салфетку из банки: вытяните её в горизонтальном направлении и резко потяните.



Протрите предварительно очищенную поверхность салфеткой.



Оставьте раствор на поверхности минимум на 30 секунд. Не смывайте.



Плотно закрывайте крышку банки после каждого использования.



CE1253



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

ЮНИДЕНТ: +7 (495) 434-4601, fax +7 (495) 434-1020
ЮНИДЕНТ-Поволжье: +7 (846) 979-8600, fax +7 (846) 979-8601
www.unident.net e-mail: unident@unident.net



UNIDENT